





# Pulsewave<sup>®</sup> Cuff Positioning Guide

Open the cuff's Velcro® tab and pull the flap through the metal clip to loosen the cuff. Do not pull the cuff through the clip beyond the stopper installed in the cuff.

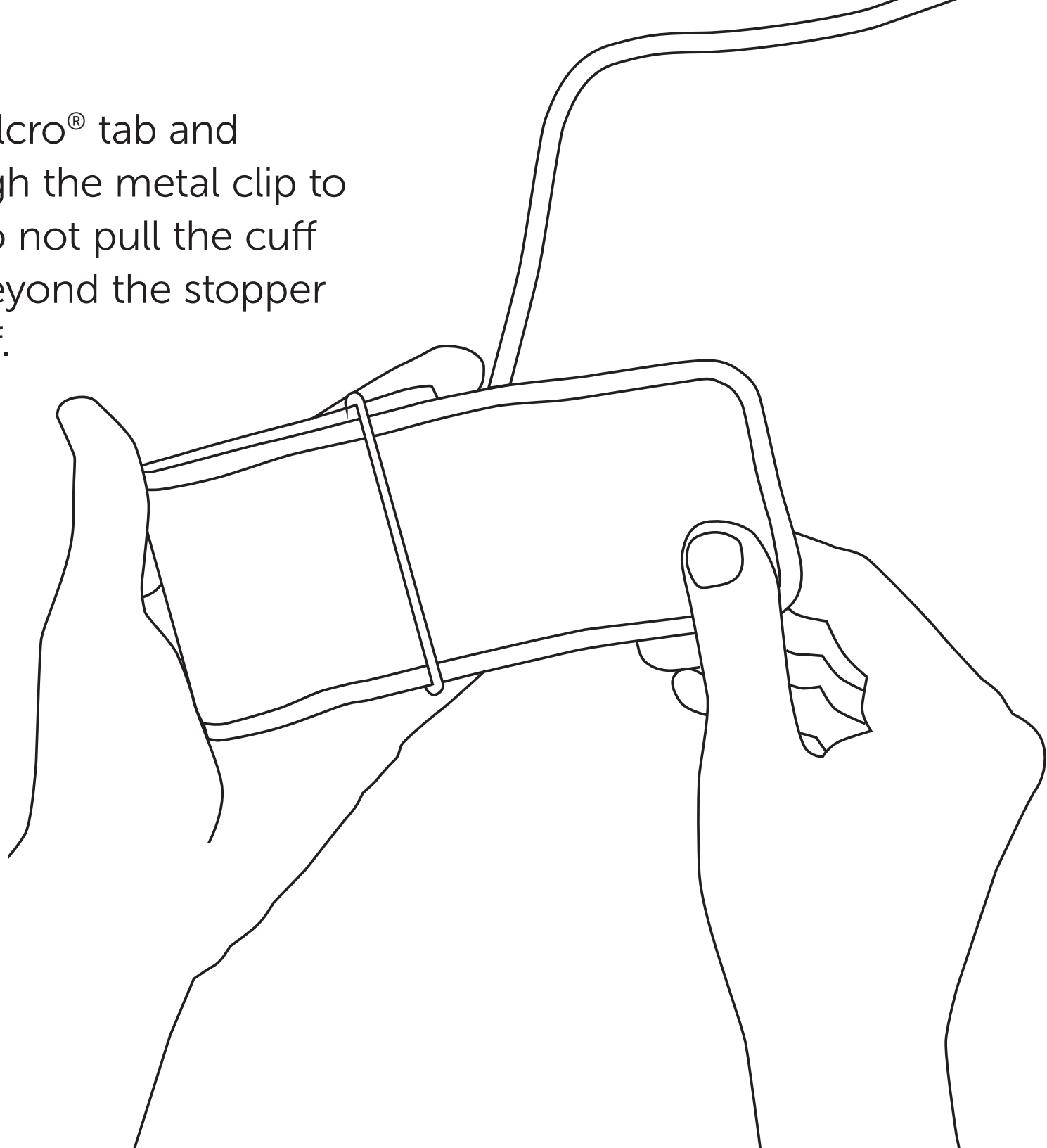


**1**

Remove any jewelry and roll up shirt sleeves. If possible, always place the cuff on your left wrist. Insert your hand through the cuff.

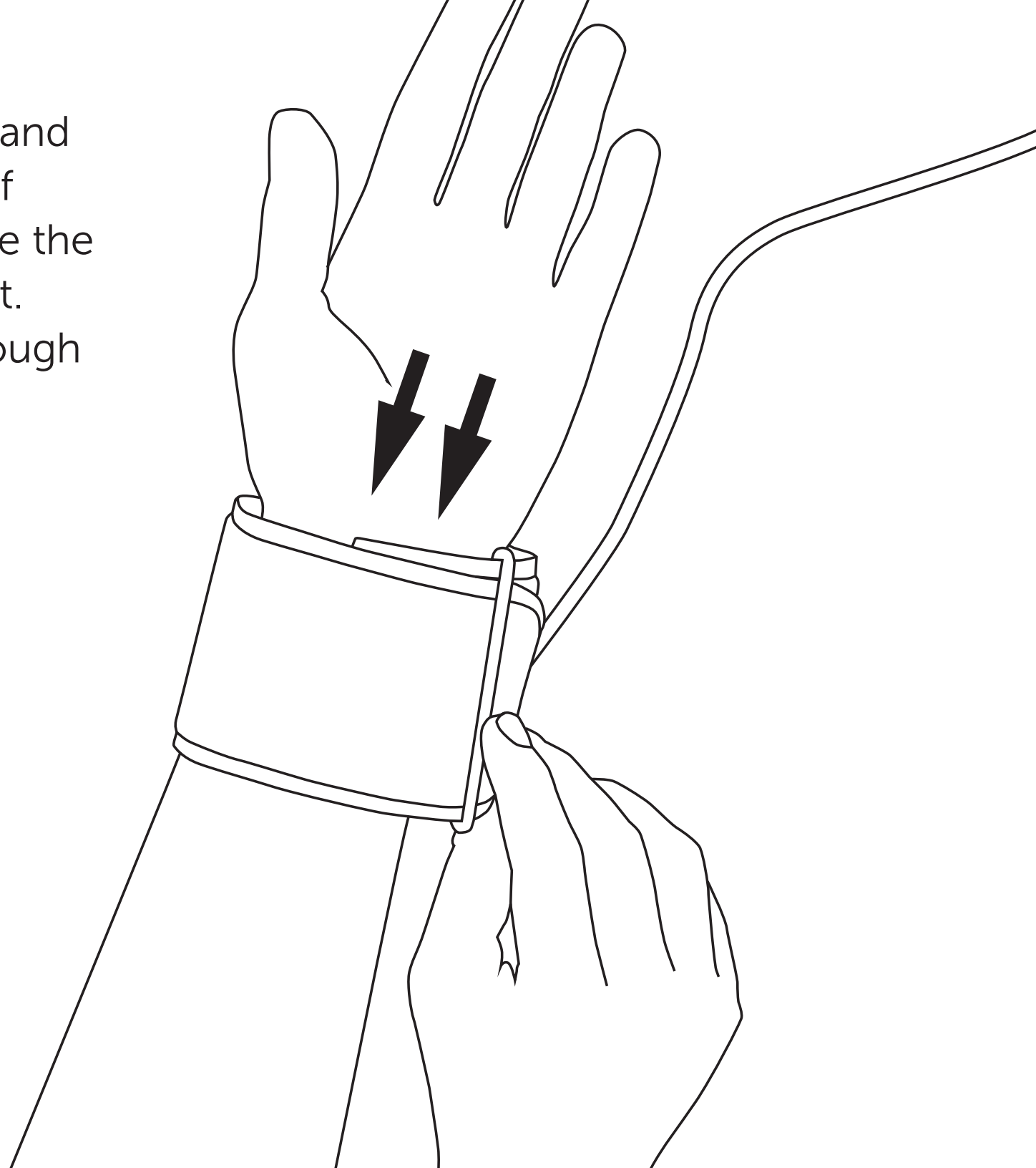


2

Pull the flap through the metal clip to tighten the cuff.

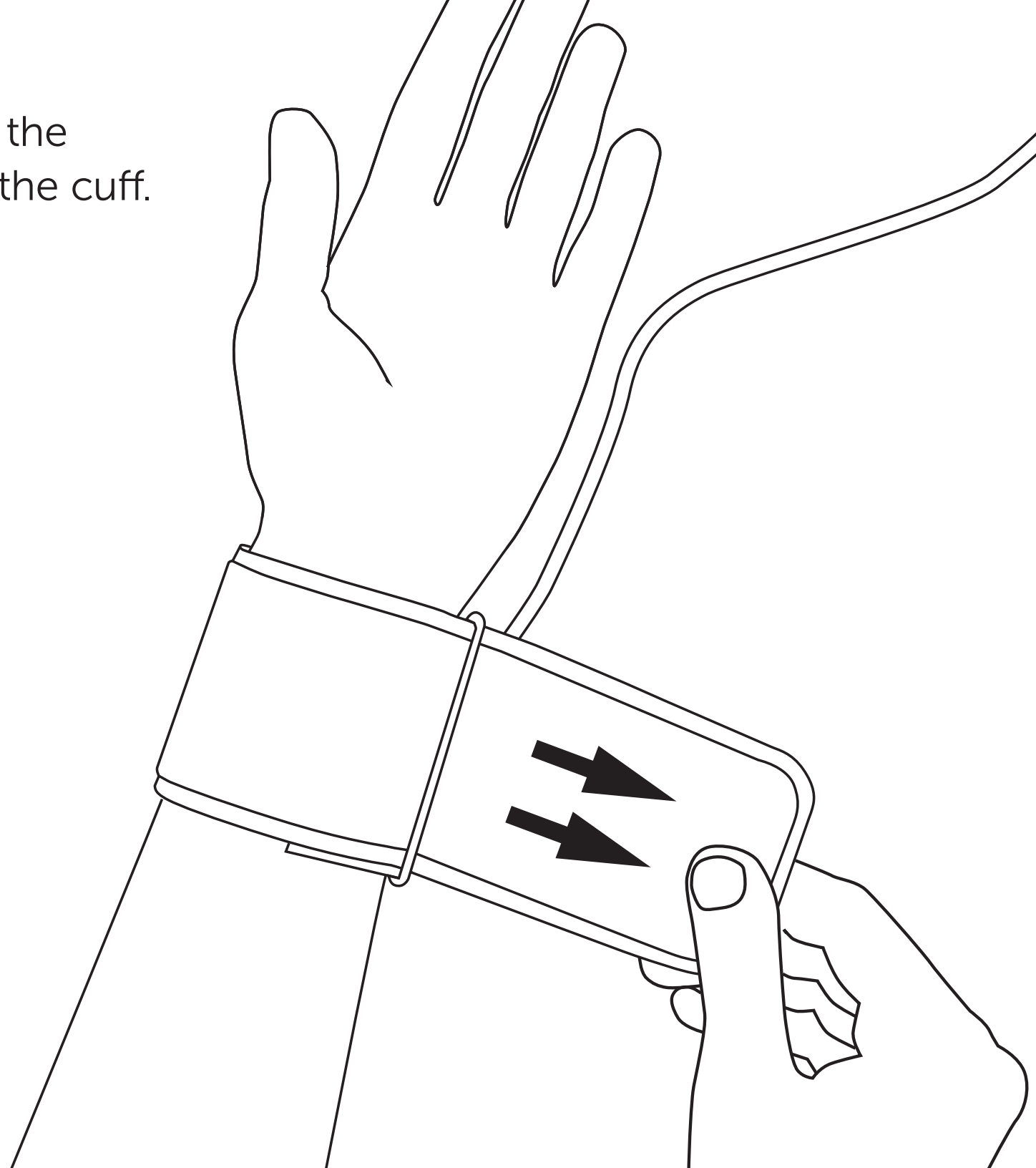


**3**

Bend the flap. Make sure the cuff is attached comfortably to your wrist. It should be snug, neither too tight nor too loose.

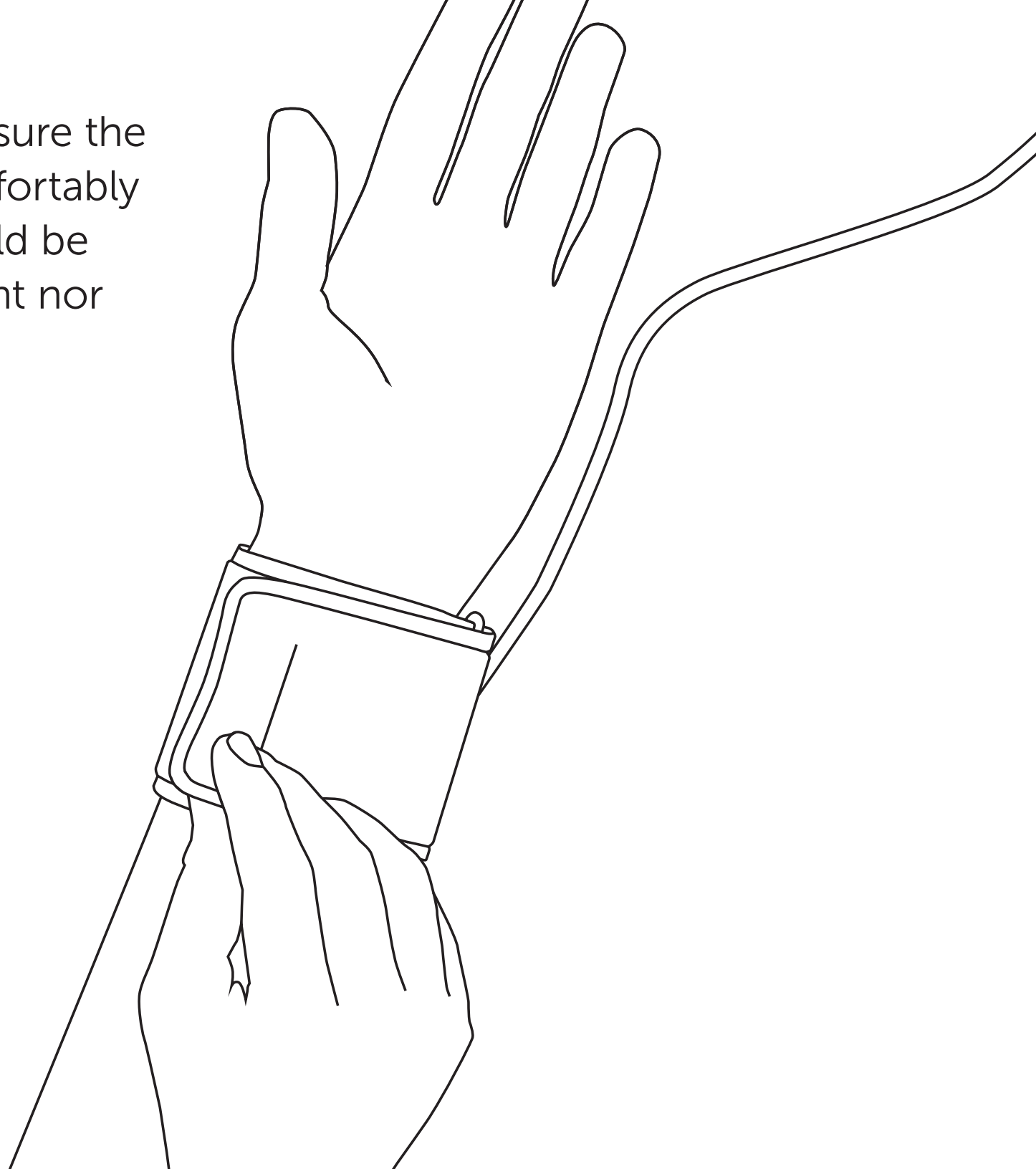

The inflatable cuff can be inverted or rotated as presented here for optimal comfort.

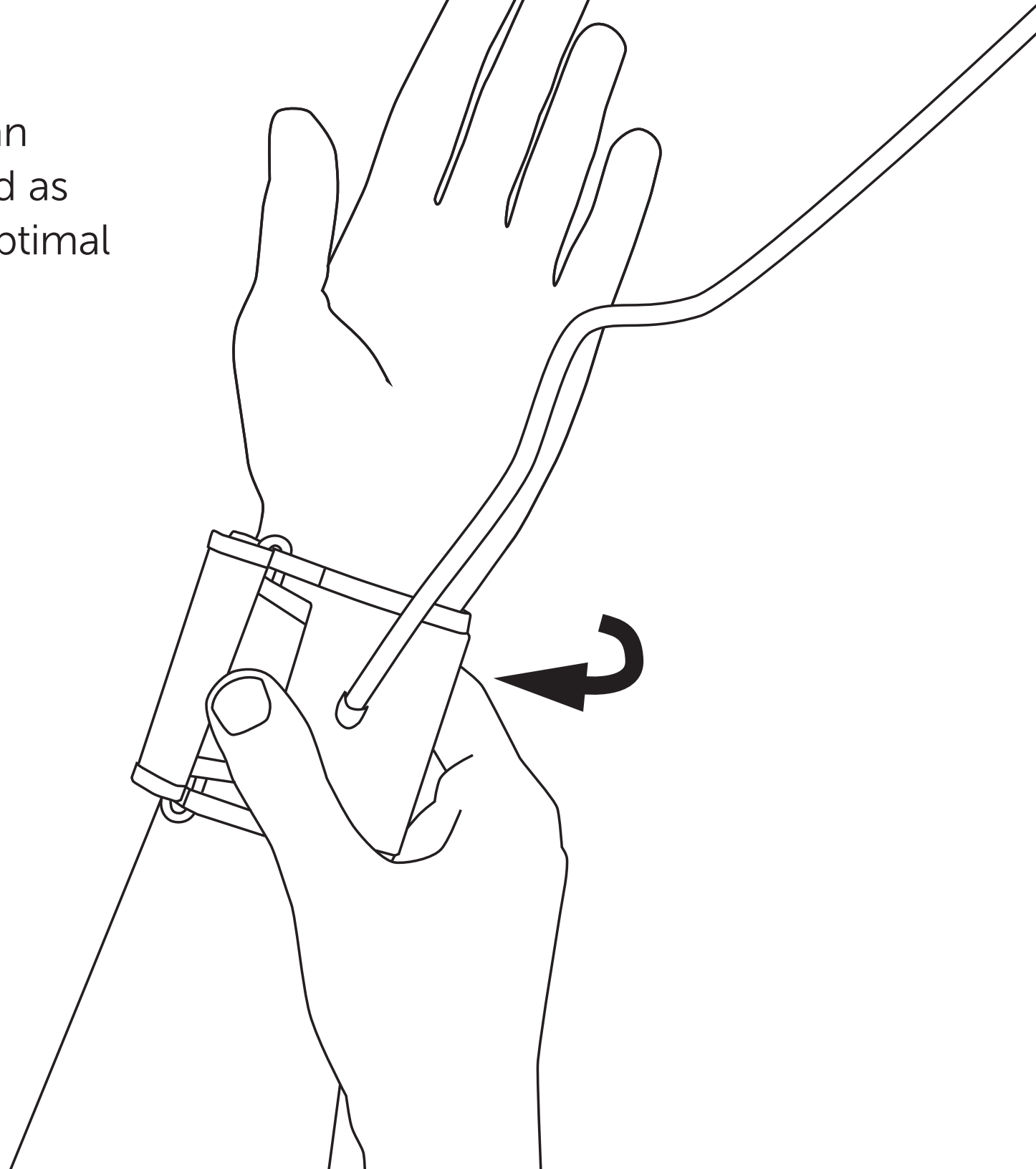

5



 Manufactured by:

**Cloud DX Inc.**

#100 - 72 Victoria Street South  
Kitchener ON  
N2G 4Y9  
clouddx.com



European Representative:  
Advena Ltd., Pure Offices  
Plato Close, Warwick CV34 6WE UK

Customer Support:  
1-888-543-0944 ext 1  
support@clouddx.com

© 2016 Cloud DX Inc

Version 1.1

**FDA**  
CLEARED


**HEALTH  
CANADA**  
LICENSED



# **Guide de positionnement du bracelet**




Défaites le Velcro® du bracelet et pour desserrer le bracelet, tirez la lanière derrière le passant en métal mais ne la tirez pas au delà du point de blocage.

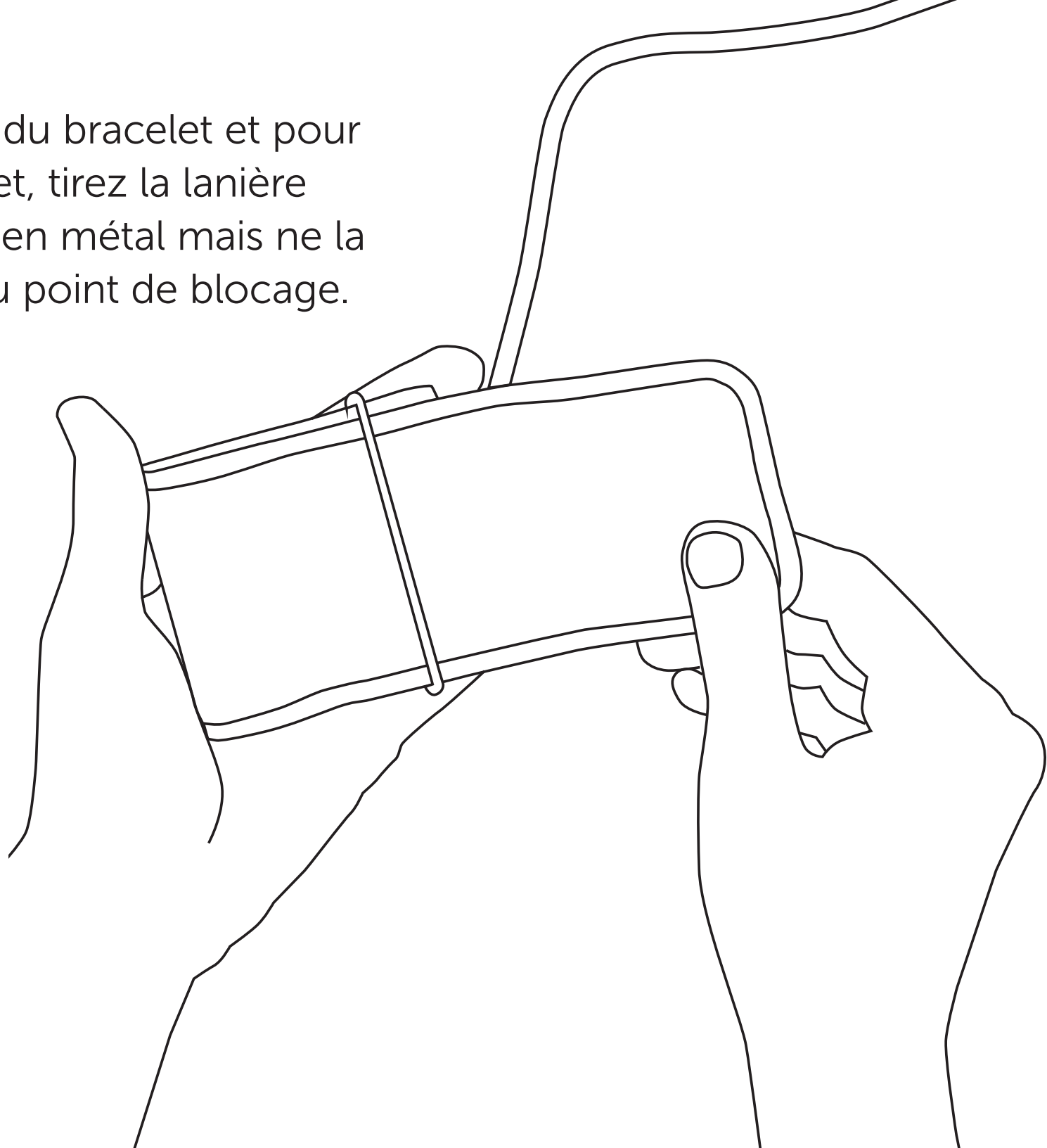


**1**

Retirez vos bijoux et remontez vos manches. Si possible, placez toujours le bracelet sur votre poignet gauche. Passez votre main dans le bracelet.

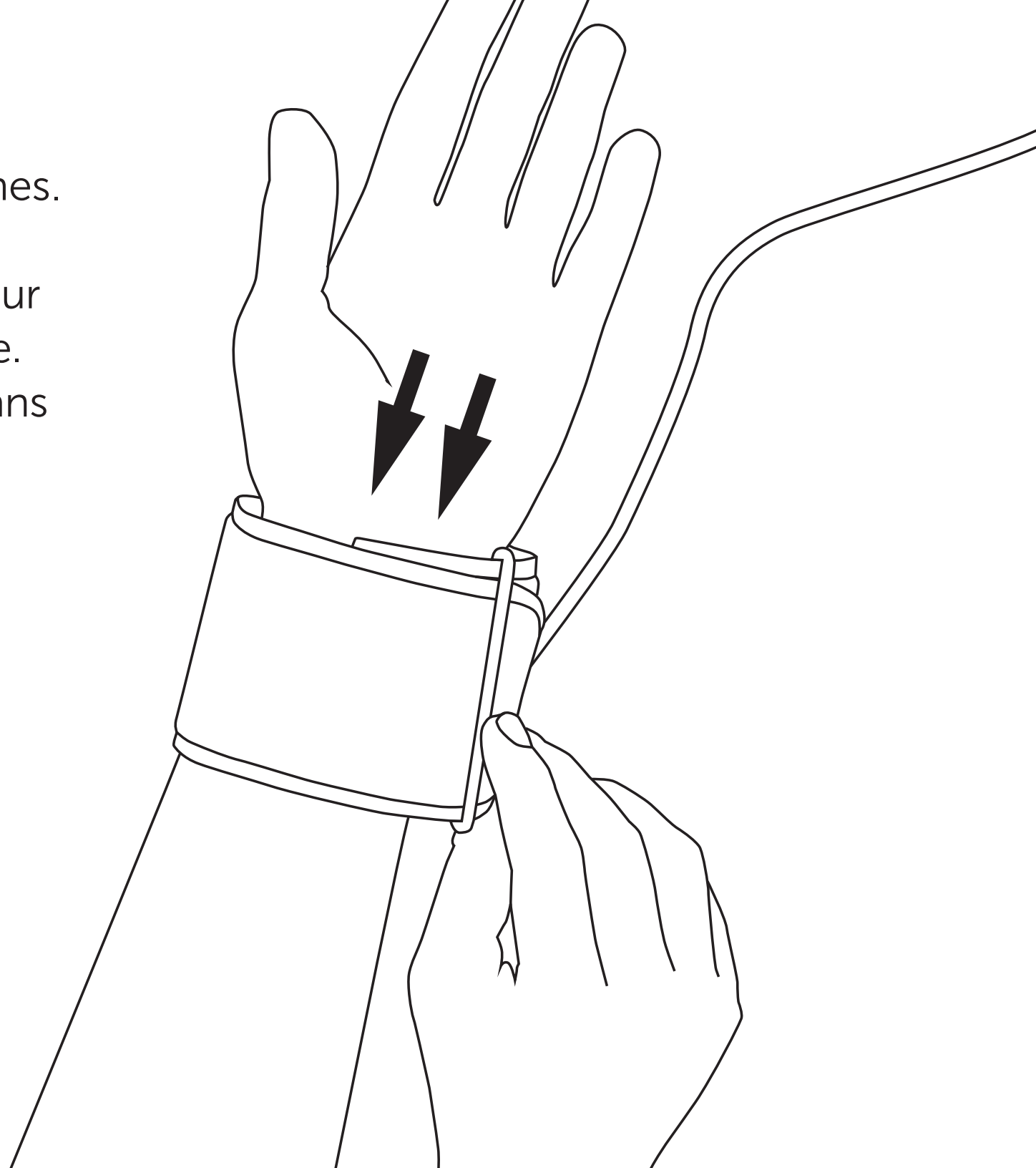


**2**

Passez le rabat à travers  
la boucle métallique pour  
resserrer le bracelet.

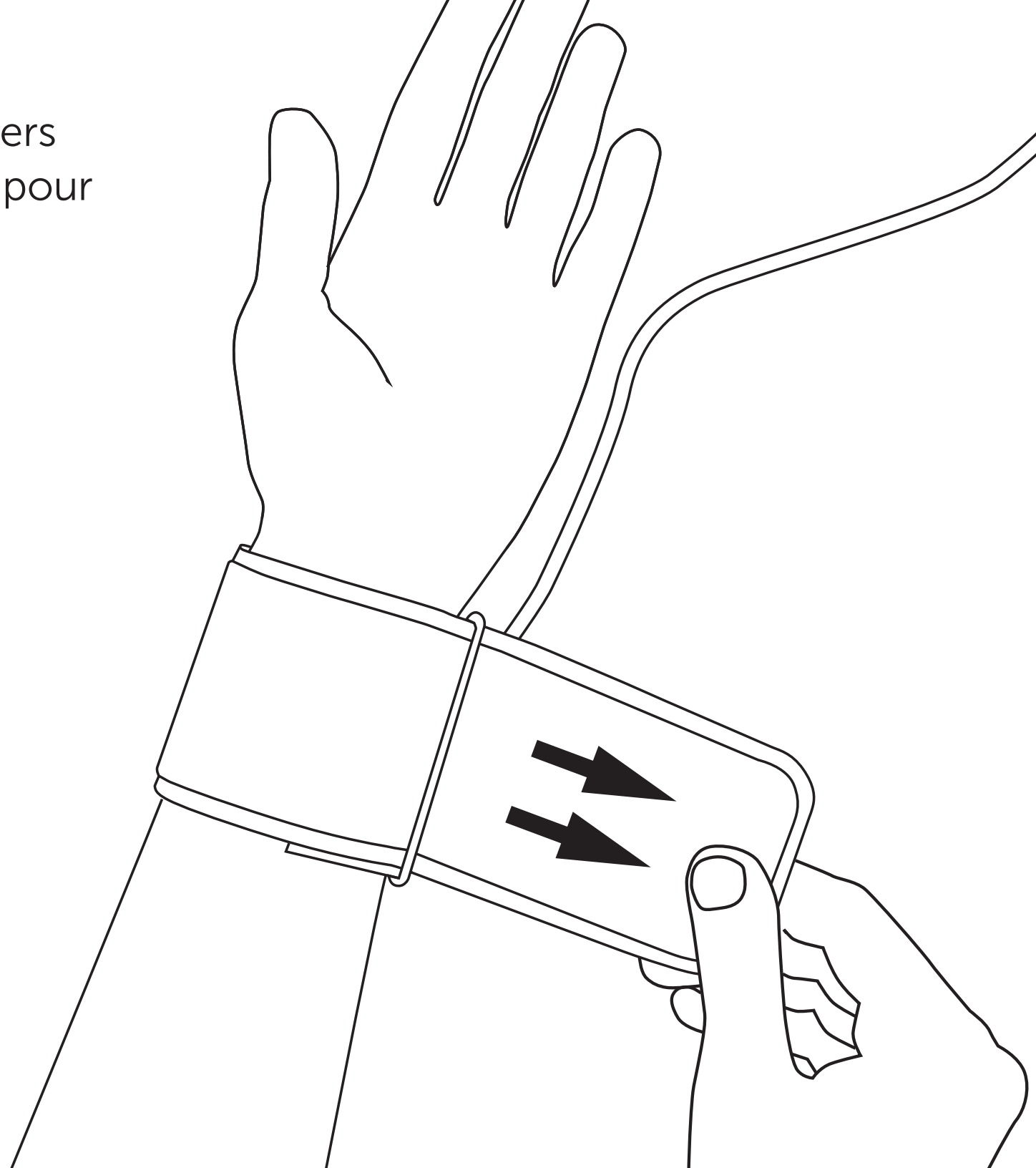


**3**

Pliez le rabat. Assurez-vous que le bracelet est confortablement en place. Il doit être ni trop serré ni trop lâche.

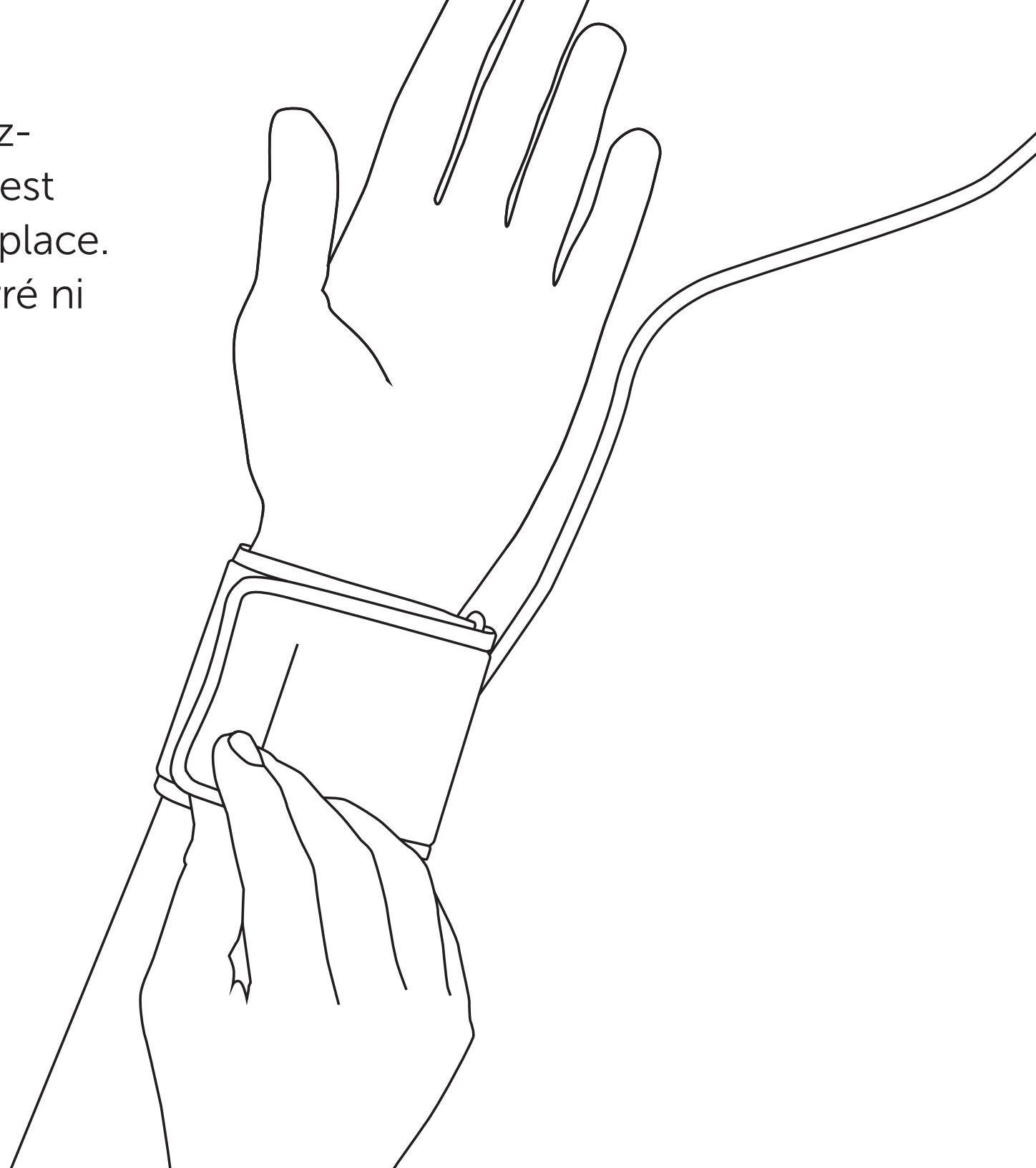

Le bracelet gonflable peut être mis dans l'autre sens ou tourné autrement que sur ce schéma.

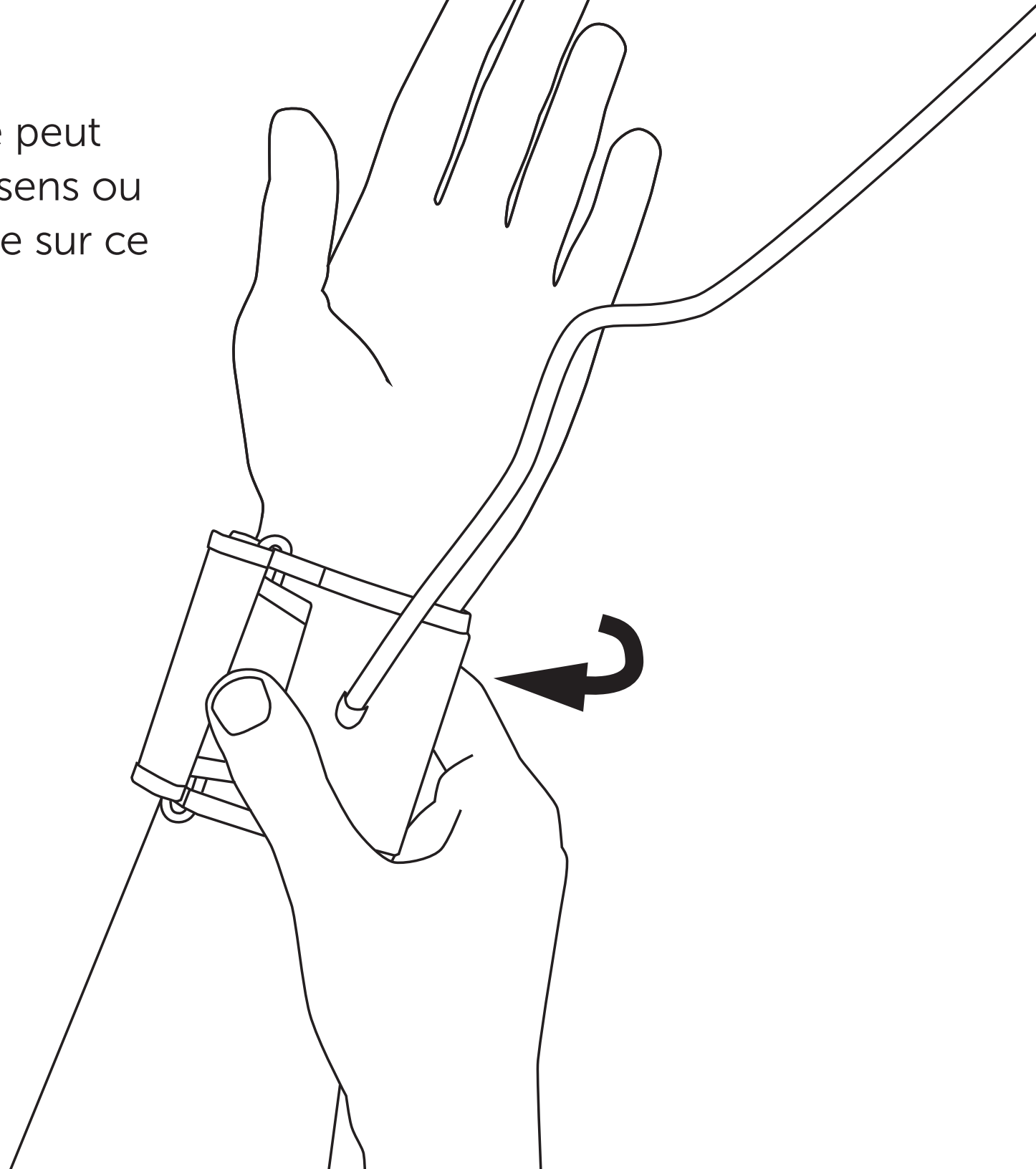



 Fabriqué par:

**Cloud DX Inc.**

#100 - 72 Victoria Street South  
Kitchener ON  
N2G 4Y9  
clouddx.com



Représentant européen:  
Advena Ltd., Pure Offices  
Plato Close, Warwick CV34 6WE UK

Service client:  
1-888-543-0944 ext 1  
support@clouddx.com

© 2016 Cloud DX Inc

Version 1.1

APPROUVÉ  
PAR LA  
**FDA**

AUTORISÉ PAR  
**SANTÉ  
CANADA**

